

(株)フォレストシンフォニー

で

3Dサラウンドクライオ

をお試し!

Information

体験者



Es通公式アンバサダー
創 杏奈さん

@my_ann_s2



自身の体のケア
まで手が回らない、育児に大忙
しの20代ママ。

体験場所



株式会社フォレストシンフォニー

●住所
東京都千代田区神田岩本町
15-1 CYKビル10F

●予約方法
機器・化粧品体験申し込みページより



体験場所のできること

新時代の痩身技術
「クライオ施術」をじっくりお試し

脱毛・ボディメイク機器など
多様なトレンド機器をまるっと体感

“トータルケア”? “特化ケア”?
先端美顔器の適切な使い分けを伝授

Trial

初の冷却瘦身体験は腹部から
装着後は自立するので◎



施術部位に凍傷防止シートを貼り、その上から
カップを装着。「温め」で脂肪をやわらかくした
後「吸引」と「冷却(4℃)」でダイレクトにア
プローチ。冷却状態を保ち、効果を上げるため
にも当日の長湯などは控えるのがオススメ。

凸凹肌が気になりがちな
内ももにしっかりアプローチ



体験では腹部よりも吸引力と冷たさをより強く
感じた体験者。感じ方は筋肉や脂肪の状態に
よって異なるとのことだが、それらが固くなり
やすい内ももは効果を感じやすい部位の一つ
なので体験にもってこい。

標準装備+特殊部位用で
6種類の3Dカップを用意



高い効果を生み出すために開発された3Dカ
ップは、6種類ものレパートリーがある。標準装
備は、腹部・脇腹・二の腕・内ももといった高
需要の部位に対応する3種類。そのほかあご
など+aの悩みに応える3種類の追加が可能。

Impression



吸引時の痛みを心配してしま
ましたが、接着面が広く均一に吸われる
ので、心地よい程度の吸引力で
した。3種類のモードのうち「温め」
ではリラックスでき、「冷却」では
肌表面が想像以上に冷たくなる感
覚に驚きも(笑)。効果的な施術
を探している方にオススメです。

“こんなサロンにオススメしたい!”



営業部
広報担当
榎笠 はる香さん

少ない負担でボディメイク効果
が期待できると、業界で注目さ
れている冷却痩身機器。本機器
の特徴は、3Dカップによる冷却
効率の高さ。施術者の技術に頼
らず結果をしっかり出したいサロ
ンに役立つこと間違いなしです。

シリコン製3Dカップ採用で
狙った脂肪を
より効率的に冷却!

ボディケア機器

3Dサラウンドクライオ



人気の冷凍技術を用いた注目のボディケア機
器。シリコン製3Dカップを採用し、痛みを抑え
つつ冷却効率アップ、ポイントケアを目指す。
W300×D470×H350 (mm)、42kg / 275万円 (税込)



株式会社
フォレストシンフォニー
TEL 06-4708-8646

Pick up
1 ロコミが広まり新規顧客増加!
話題の“冷却痩身”をサロンで体験




冷却効果により効率的な部分痩せをサポートする、クリ
ニックでも人気の“冷却痩身”のエステティック版機器
が登場。「冷却によるボディメイク」という革新性が話
題を呼び、SNSのロコミを見た新規顧客やリピーター
も急増。結果と話題性を両立するため、集客の起爆剤
を求めるサロンにオススメの1台。

詳しくは
こちら!



Pick up
2 シリコンカップで冷却効率アップ!
ダイレクトなアプローチを実現

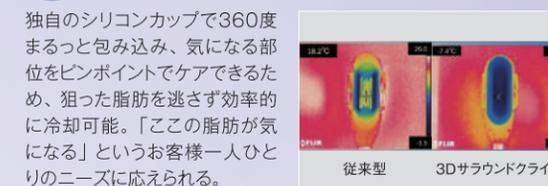

独自のシリコンカップで360度
まるっと包み込み、気になる部
位をピンポイントでケアできるた
め、狙った脂肪を逃さず効率的
に冷却可能。「この脂肪が気
になる」というお客様一人ひと
りのニーズに応えられる。

Pick up
3 簡単操作で技術差0を実現!
非接触型なのうれしい



施術はカップを気になる部位に
セットするだけ。シンプルな操
作なので新人スタッフでも使用し
やすく、技術差が起らないの
うれしいポイント。非接触型で
コロナ禍の経営スタイルにも相
性抜群だ。

導入への
第一歩

まずは導入事例を知ろう!

体の状態を確認
して機器を設定



ソフトリンパ
流し

簡単施術で技術差の悩みを解消

手技はもちろん、従来のキャビテーションやラジオ波との組み合わせでボディメイクや部
分ケアの結果出しをアップデート。カップを装着して放置するだけの簡単施術で新人でも
すぐに扱えるため、サロンで活躍すること間違いなし。

+α
アイテム

「合わせて使ってさらなるキレイを」
FSポレーションセラム
フォーボディ



フオスファチジルコリン配合で、め
ぐりをよくし効率的なボディメイク
をサポートする高機能ボディ専用
美容液。ポレーション機器での導
入も可能。
500ml / 8,800円 (税込)

◀ 組み合わせると…

冷却施術後、『FSポレーションセ
ラムフォーボディ』を塗布し、マッ
サーズを行なうことで、施術部位
の排出を促進、変化を実感しやす
い体へと導く効果も期待できる。